



 **DMG**

Icon® – innowacyjne leczenie próchnicy bez borowania.

Nasz priorytet to: Zachowanie zdrowych tkanek zęba!

Wejdź w nową erę leczenia stomatologicznego. Od teraz masz okazję, aby zatrzymać próchnicę! Skorzystaj z innowacyjnej, do dziś nie znanej techniki, która zachwyci Twoich pacjentów - bez borowania, bezboleśnie i bez niepotrzebnej utraty zdrowych tkanek zęba. Zapoznaj się z nią sam i zaoferuj swoim pacjentom ten mikroinwazyjny sposób leczenia.



Zostań partnerem ruchu: »BOROWANIE? NIE, DZIĘKUJĘ!«

Problem: Próchnica początkowa!

Dotychczasowe metody leczenia nie dają zadowalających rozwiązań.



Przekrój międzyzębowych zmian próchnicowych.

- **Terapia fluorowa?**
Nie zawsze skuteczna w zaawansowanym stadium.
- **Wypełnienie?**
Zbyt duża utrata zdrowych tkanek zęba nawet przy minimalnie inwazyjnym opracowaniu ubytku.

Pierwsze sygnały to już zły znak!


Objawy próchnicy:

- W początkowej próchnicy następuje utrata związków mineralnych poprzez niezmienną zewnętrzną warstwę szkliwa.
- Ta demineralizacja powoduje zwiększenie porowatości zmienionego szkliwa o 30 %, a nawet więcej.
- Zwiększenie porowatości powoduje, iż próchnicotwórcze kwasy łatwiej rozpuszczają minerały twardej tkanki zęba.

Przyjrzyjmy się problemowi bliżej!



Kliniczny obraz początkowych zmian próchnicowych.

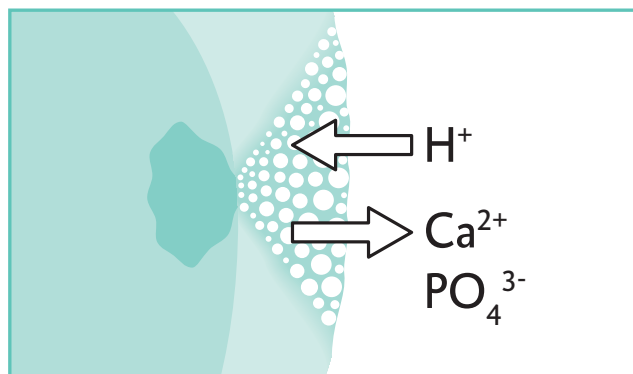


System porowatości szkliwa w początkowej próchnicy.


Rewolucyjne rozwiązanie: Icon z DMG!

Infiltracja próchnicy dzięki Icon DMG.

- Opracowane we współpracy z Charité w Berlinie i Uniwersytetem w Kilonii.
- Z produktem Icon możesz zatrzymać rozwój próchnicy bez borowania i bez zbędnych strat zdrowych tkanek zęba.

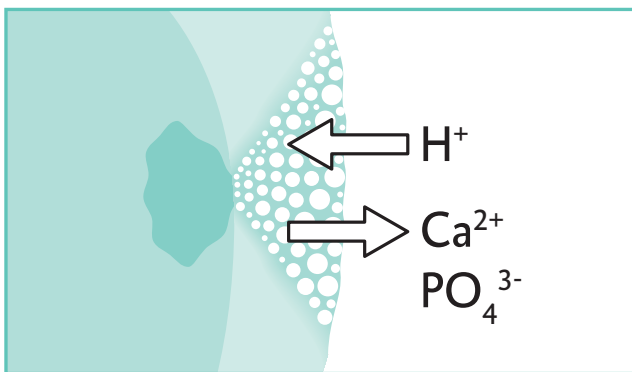

Demineralizacja szkliwa pod wpływem działania kwasów.

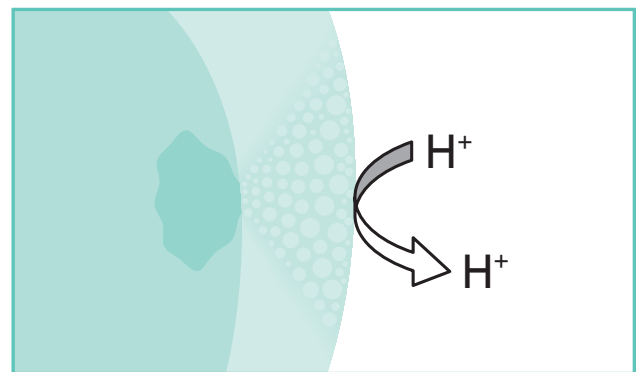


Icon blokuje drogi dyfuzji.




Opakowania Icon do leczenia powierzchni międzyzębowych i przedsińkowych.

Z Icon to takie proste: Wypełnij, ustabilizuj, zamknij!


Aplikacja

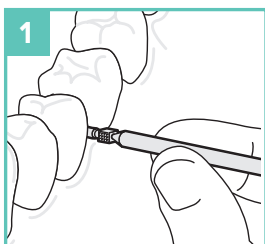


Nieznacznie odseparuj zęby za pomocą specjalnego klina.

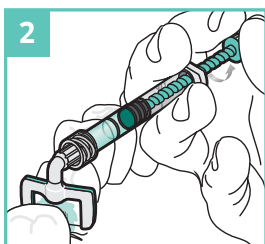


Usuń zewnętrzną warstwę szkliwa 15% żelem HCl, aby dostać się do »podpowierzchniowych« porów.

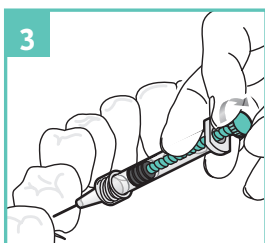





Wysusz leczoną powierzchnię etanolem.

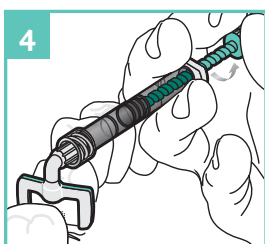

Nanieś żywicę Icon za pomocą załączonego zestawu do aplikacji. Dzięki siłom kapilarnym żywica Icon jest samoistnie absorbowana wypełniając pory.

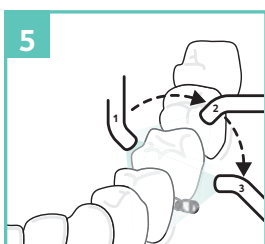

Usuń nadmiary materiału i utwórz światłem.

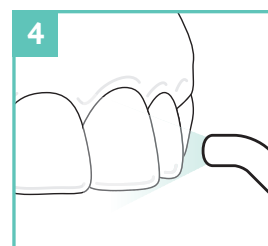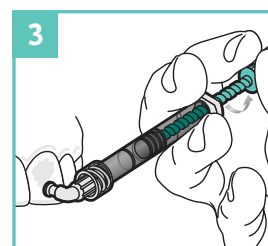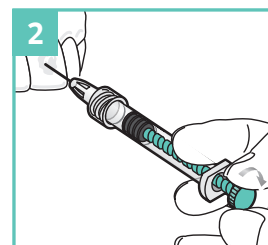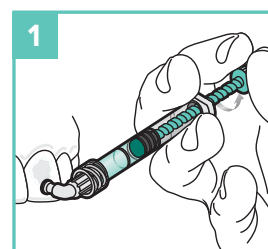


Dwa ostatnie kroki postępowania **należy powtórzyć (1x)**.
W sumie cała procedura leczenia **trwa około 15 minut**.

A wynik? Po prostu spektakularny!

Olbrzymie korzyści dla Ciebie i Twoich pacjentów:

- Postęp próchnicy może być zatrzymany i zapobiega nawrotom.
- Zdrowe twarde tkanki zęba są zachowane.
- Leczona powierzchnia wygląda jak zdrowe szkliwo. Metoda ta może być również stosowana w leczeniu »białych plam«.
- Przedłużenie długości życia zęba.
- Bezbolesna technika: bez znieczulenia, bez borowania.
- Łatwe leczenie podczas jednej wizyty.
- Idealny dla pacjentów, którzy nie stosują się do zaleceń lekarskich.

Wskazania do zastosowania Icon:

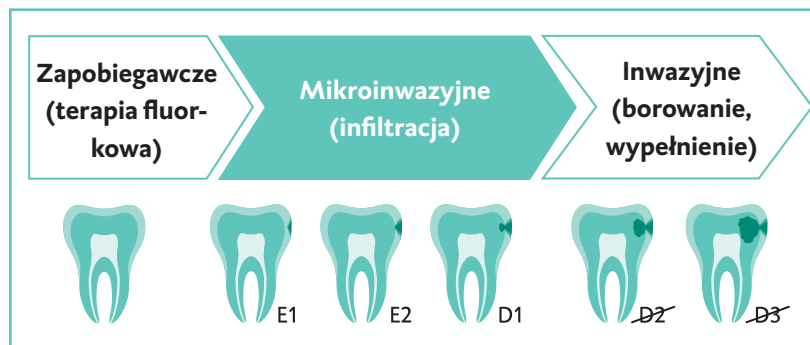

Icon jest wskazany dla zmian w obszarach E1, E2 i D1.



Approximal-Tip



Approximal-Tip w przestrzeni międzyzębowej.



Vestibular-Tip



Przypadek kliniczny: początkowa sytuacja.



Wynik leczenia po upływie jednego roku.

Kierunek międzynarodowych badań: Przyszłość to zabiegi mikroinwazyjne.



Szczegółowy przegląd prac badawczych nad Caries Infiltration Studies dostępny jest na stronie www.drilling-no-thanks.com

Twoja praktyka jest dla nas ważna: Poznaj Icon bezpośrednio u nas!

Mamy przyjemność zaprezentować i zademonstrować rewolucyjną metodę leczenia Icon w Twojej praktyce.



Icon Infiltrant próchnicy – powierzchnia proksymalna

Starter Kit

2 Opakowania zawierające po:

- 1 strzykawka @ 0.30 ml Icon-Etch
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Dry
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Approximal-Tips
- 1 Luerlock-Tip
- 4 kliny dentystyczne

REF 220341

Opakowanie ekonomiczne

7 Opakowań zawierających po:

- 1 strzykawka @ 0.30 ml Icon-Etch
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Dry
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Approximal-Tips
- 1 Luerlock-Tip
- 4 kliny dentystyczne

REF 220237



Icon Infiltrant próchnicy – powierzchnia przedsiionkowa

Starter Kit

2 Opakowania zawierające po:

- 1 strzykawka @ 0.30 ml Icon-Etch
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Dry
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Vestibular-Tips
- 1 Luerlock-Tip

REF 220343

Opakowanie ekonomiczne

7 Opakowań zawierających po:



- 1 strzykawka @ 0.30 ml Icon-Etch
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Dry
- 1 strzykawka @ 0.45 ml Icon-Infiltrant
- 6 Vestibular-Tips
- 1 Luerlock-Tip

REF 220238



Nasz lokalny dystrybutor:

Liczba ubytków do leczenia / opakowanie

Wskazanie	 approximal		 vestibulär	
	Starter Kit	Opakowanie ekonomiczne	Starter Kit	Opakowanie ekonomiczne
Liczba zestawów	2	7	2	7
Liczba ubytków do leczenia	4	14	4-6	14-21

 **DMG** O uśmiech dalej.

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Niemcy
Fon: +49. (0)40.8 40 06-0 Fax: +49. (0)40.8 40 06-2 22
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com