

# Palodent® V3

## System formówek częściowych

### INSTRUKCJA UŻYCIA - POLSKI

Uwaga: Tylko do użytku stomatologicznego.

#### 1. OPIS PRODUKTU

System formówek częściowych Palodent® V3 obejmuje niklowo-tytanowy pierścień stabilizujący, klin międzyzębowy, klin WedgeGuard i formówki częściowe do wykonywania uzupełnień w obszarze zębów bocznych. Formówki częściowe nadają się do stosowania ze wszystkimi materiałami do uzupełnień zębów w obszarze bocznym. Formówki Palodent® V3 EZ są wykończone bardzo cienką, nieklejącą się warstwą, minimalizującą ryzyko przyklejania się materiału wiążącego lub kompozytu do paska formówki, co sprawia, że usuwanie formówki jest łatwiejsze. Pierścienie stabilizujące są dostępne w wersji wąskiej, przeznaczonej do większości przedtrzonowców i małych trzonowców, oraz w wersji uniwersalnej, przeznaczonej do większych trzonowców. Pierścienie można stosować zarówno pojedynczo, jak i razem do jednoczesnej uzupełnienia wielu powierzchni. Zalety formówek częściowych i pierścieni obejmują naturalne kontury zapewniające lepszą kontrolę obszarów styčných i wcięć między brzegami siecznymi, łatwość zakładania, lepszą wizualizację pola zabiegowego oraz większy komfort lekarza i pacjenta. Eliminacja efektu dźwięku konwencjonalnych formówek umożliwiła lekarzom stosowanie mniejszych sił napinających, dzięki czemu unika się nadmiernego ściskania zęba i łatwiejsze jest tworzenie anatomicznych proksymalnych obszarów styčných. W przypadku założenia przed opracowaniem ubytku, innowacyjny klin WedgeGuard, stanowiący kombinację klina i ekranu ochronnego, chroni sąsiednie powierzchnie przed nieodwracalnym uszkodzeniem podczas opracowywania ubytku. Zastosowanie pincety z bolcami umożliwia łatwe ześlizgnięcie się ekranu ochronnego i bezpieczne pozostawienie klina na miejscu.

##### 1.1 Postaci produktu (niektóre postaci produktu mogą nie być dostępne we wszystkich krajach)

- Formówki częściowe są dostępne w klasycznej postaci z polerowanej stali nierdzewnej lub w postaci nieklejących się formówek z oznaczeniem barwnym Palodent® V3 EZ Coat w 5 rozmiarach: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm i 7,5 mm. Formówki te nadają się do stosowania ze wszystkimi materiałami do uzupełnień zębów w obszarze bocznym.
- Pierścienie stabilizujące są dostępne w rozmiarze wąskim (kolor ciemnoniebieski) i uniwersalnym (kolor jasnoniebieski) oraz nadają się do stosowania w obszarze zębów bocznym pojedynczo lub razem.
- Kliny i kliny WedgeGuard są dostępne w rozmiarze małym (kolor ciemnoniebieski), średnim (kolor średnoniebieski) i dużym (kolor jasnoniebieski).

##### 1.2 Skład

- Formówki częściowe i ekran WedgeGuard: polerowana stal nierdzewna;
- formówki Palodent® V3 EZ Coat: polerowana stal nierdzewna z powłoką Whitford 8820HR
- Pierścienie stabilizujące: stop niklowo-tytanowy z ząbkami wzmocnionymi włóknem szklanym
- Klin i WedgeGuard: poliacetal termoplastyczny
- Kleszce do zakładania i pinceta z bolcami: stal nierdzewna 420

##### 1.3 Wskazania do stosowania

- System Palodent® V3 jest wskazany do wykonywania uzupełnień klasy II w celu ułatwienia konturowania materiałów do uzupełnień wykonywanych metodą bezpośrednią.
- Klin Palodent® V3 WedgeGuard jest wskazany do zakładania przed zabiegiem w celu ochrony powierzchni sąsiadujących z preparacjami ubytków klasy II, klasy III, licówek i koron.

##### 1.4 Przeciwwskazania

Brak znanych.

## 2. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy przestrzegać następujących ogólnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz specjalnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w innych rozdziałach niniejszej instrukcji użycia.

### Symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Jest to symbol ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Służy do ostrzegania użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z obrażeniami ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, które są umieszczone po tym symbolu, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

#### 2.1 Ostrzeżenia

- System Palodent® V3 składa się z małych, ostrych części. Jak w przypadku wszystkich instrumentów stosowanych w jamie ustnej, należy zachować ostrożność w celu zapewnienia stabilnego użytkownika i zakładania. Przed zabiegami operacyjnymi zaleca się założenie koferdamu lub zastosowanie innej odpowiedniej izolacji. Nosić odpowiednie okulary ochronne i rękawiczki.  
**Aspiracja:** W przypadku aspiracji formówki, klina, klina WedgeGuard lub pierścienia stabilizującego należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.  
**Połknięcie:** Po przypadkowym połknięciu należy poinformować pacjenta, aby zwrócił się o pomoc lekarską w celu lokalizacji połkniętej części. W przypadku wystąpienia nudności lub objawów chorobowych należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.  
**Pokaleczenie:** Formówki Palodent® V3 i ekrany WedgeGuard są ostre i mogą rozciąć niechronioną skórę. Podczas pracy z formówkami i ekranami WedgeGuard zaleca się noszenie rękawiczek i/lub posługiwanie się pincetą z bolcami lub podobnym instrumentem. W przypadku pokaleczenia skóry czystą formówką lub ekranem WedgeGuard należy zastosować normalne środki do udzielania pierwszej pomocy. Wyrzucić i prawidłowo utylizować formówkę lub ekran WedgeGuard.
- Używane formówki i akcesoria są zanieczyszczone. Należy postępować zgodnie z planami kontroli narażenia. W razie przypadkowego narażenia należy postępować zgodnie z zalecanymi procedurami po narażeniu. Po użyciu systemu Palodent® V3 wymagane jest prawidłowe postępowanie i utylizacja. Używane formówki są zanieczyszczone i ostre. Podczas posługiwania się lub utylizacji należy zastosować takie środki ostrożności jak w przypadku posługiwania się lub utylizacji innych zanieczyszczonych ostrych materiałów.
- Należy zachować ostrożność, aby mieć dobrą kontrolę nad każdym instrumentem w celu ochrony pacjentów przed obrażeniami.
- Prawidłowo umieszczone pierścienie stabilizujące są źródłem siły ściskającej zapewniającej stabilizację. Wąskie pierścienie należy stosować na dużych opracowanych zębach trzonowych. Dowlone pierścienie można stosować na zębach osłabionych rozległym opracowaniem i/lub zębach o niewzmocnionej strukturze, która może być przyczyną pęknięcia lub złamania zęba. W przypadku osłabionych zębów należy rozważyć zastosowanie alternatywnej formówki.

#### 2.2 Środki ostrożności

- Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w sposób szczegółowo opisany w instrukcji użycia. Jakkolwiek użytkowanie tego produktu niezgodne z instrukcją użycia odbywa się według uznania i na wyłączną odpowiedzialność lekarza.
- Należy zachować ostrożność podczas zakładania pierścienia stabilizującego, ponieważ pierścień może sprężynować. Przed założeniem należy upewnić się, że pierścień jest kompletnie osadzony w kleszczach. Przed wycofaniem kleszczy należy skontrolować, czy pierścień jest bezpiecznie osadzony dowierchołkowo (patrz Instrukcje Krok Po Kroku). Należy zawiązać nić dentystyczną do pierścienia Palodent® V3 w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa.
- Nadmierny nacisk wywierany w kierunku dowierchołkowym na formówkę, klin, WedgeGuard lub pierścień stabilizujący może prowadzić do urazu tkanek przyzębia.
- Produkty oznaczone „jednorazowe użycie” na etykiecie są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Wyrzucić po użyciu. Nie używać ponownie u innych pacjentów, aby uniknąć skażenia krzyżowego.
- Nie używać wyposażenia dodatkowego innego niż to zaprojektowane, dostarczone i/lub wymienione jako przeznaczone do stosowania z systemem Palodent® V3. W przeciwnym razie może dojść do obrażenia (patrz Instrukcje Krok Po Kroku).

#### 2.3 Działania niepożądane

- Nieprawidłowe użycie produktu może spowodować niepowodzenie prowadzące do urazu układu oddechowego, pokarmowego, oczu, skóry lub błony śluzowej (patrz Przeciwwskazania, Ostrzeżenia i Środki ostrożności).
- Nieprzestrzeganie prawidłowego stosowania zatwierdzonych technik użycia i utylizacji może stanowić zagrożenie dla organizmów żywych (patrz Ostrzeżenia i Środki ostrożności).
- Wąskie pierścienie stabilizujące należy stosować na dużych zębach. Dowlone pierścienie stabilizujące można stosować na zębach osłabionych lub zębach o niewzmocnionej strukturze, która może być przyczyną złamania zęba (patrz Ostrzeżenia).

#### 2.4 Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze 10 °C-24 °C, chroniąc przed wilgocią lub nadmierną wilgotnością. Chronić przed nasłonecznieniem. Chronić przed ogniem lub źródłem zapylenia.

## 3. INSTRUKCJE KROK PO KROKU

#### 1. Sterylizacja przed zabiegiem

Formówki, kliny i kliny WedgeGuard są przeznaczone do jednorazowego użycia. W razie potrzeby komponenty te można poddać sterylizacji w autoklawie parowym jeden raz (temperatura 134 °C, minimalny czas ekspozycji 3 minuty) przed użyciem klinicznym. Pierścienie stabilizujące, kleszce i pincety z bolcami nie są dostarczane w stanie sterylnym i należy je poddać sterylizacji w autoklawie parowym przed pierwszym i przed każdym kolejnym użyciem (patrz punkt Higiena).

#### 2. Umieścić koferdam lub zaizolować inną odpowiednią techniką.

#### 3. Założenie przed zabiegiem (opcjonalnie)

- Założenie klina ochronnego WedgeGuard  
Przed opracowanie należy wybrać odpowiedni rozmiar klina ochronnego WedgeGuard i umieścić go interproksymalnie. Kliny ochronne Palodent® V3 WedgeGuard są wyposażone w uchwyty aplikacyjny z otworem, który można pewnie chwycić pincetą z bolcami. Nie stosować nadmiernej siły.  
LUB
- Założenie pierścienia  
W celu efektywnego używania konturowanej formówki częściowej musi występować wystarczająca przestrzeń międzyzębowa na założenie formówki bez użycia siły lub odkształcenia. Pierścienie stabilizujące, założony przed rozpoczęciem opracowania ubytku i pozostawiony na czas jego trwania, zapewnią odpowiednią separację bez wydłużenia czasu zabiegu. **WSKAZÓWKI:** Nie zakładać pierścienia stabilizującego przed zabiegiem w przypadku używania klina WedgeGuard. Po zakończeniu opracowania, usunięciu ekranu ochronnego i założeniu formówki należy postępować zgodnie z instrukcją założenia pierścienia, (krok 7).

W celu założenia pierścienia należy chwycić go w miejscu jego najszerszej średnicy dostarczonymi kleszczami, upewniając się, że pierścień znajduje się w kanale na szczękach kleszczy. Rozewrzeć kleszce w celu rozciągnięcia pierścienia tylko na tyle, aby osiągnąć wysokość konturu zęba. Nie rozciągać za bardzo. Zbyt duże rozciągnięcie może prowadzić do trwałego odkształcenia pierścienia. Można zastosować suwak blokujący na kleszczach, aby ułatwić przenoszenie i zakładanie pierścienia.

Umieścić pierścień z jednym ząbkem w każdej przestrzeni międzyzębowej od strony policzkowej do językowej, w sposób przylegający do odbudowywanej powierzchni. Nie ma znaczenia kierunek (mezjalny lub dystalny), w który wskazuje pierścień, jednak założenie go w taki sposób, że wskazuje kierunek mezjalny, jest zazwyczaj łatwiejsze do uzyskania z powodu łatwiejszego dostępu.

Przy ząbkach prawidłowo umieszczonych w przestrzeniach międzyzębowych zwolnić suwak blokujący i powoli zmniejszyć nacisk kleszczy. Po bezpiecznym osadzeniu pierścienia całkowicie zwolnić nacisk kleszczy i wycofać je.



#### Małe części pod naprężeniem

- Należy upewnić się, że pierścień jest bezpiecznie osadzony w kleszczach przed wprowadzeniem do jamy ustnej pacjenta.
- Należy upewnić się, że pierścień jest bezpiecznie osadzony przywierzchołkowo przed wycofaniem kleszczy.

#### 4. Opracowanie ubytku

Opracować jak zwykle ubytek. Po zakończeniu opracowania usunąć pierścień lub metalowy ekran ochronny klina WedgeGuard (jeśli dotyczy). Pincetą z bolcami chwycić otwór na ekranie WedgeGuard i przesuwać ekran do boku, aby go usunąć. Klin może pozostać na miejscu, jeśli znajduje się dowierchołkowo do dziąsłowych krawędzi powierzchni ubytku. Prawidłowo utylizować ekran razem z zanieczyszczonymi ostrymi przedmiotami.

#### 5. Dobór formówki

Do większości zastosowań zalecana jest konturowana formówka częściowa Palodent® V3 w rozmiarze 5,5 mm. Formówki w rozmiarach 4,5 mm i 3,5 mm są przeznaczone do stosowania u młodzieży i pacjentów ze słabo wyróżnionymi zębami bocznymi. Są one również idealne do techniki bezpośredniej-pośredniej. Formówka w rozmiarze 6,5 mm jest przeznaczona do większych ubytków w powierzchni zgryzowo-dziąsłowej. Konturowana

na formówka ma tu występ dziąsłowy i regulowane przedłużenie konturu przy grzebieniu brzętnym. Formówka w rozmiarze 7,5 mm jest przydatna dla pacjentów z problemami przyzębia, które wymagają większego pokrycia w kierunku brzegu przydziąsłowego.

**Porada techniczna:** Pierścienie, formówki, kliny i kliny WedgeGuard można stosować z najbardziej popularnymi systemami formówek, w tym innymi formówkami częściowymi. Pierścienie, kliny i kliny WedgeGuard można stosować z większością formówek pierścieniowych. Zalety konturów pierścienia, klina i WedgeGuard wspomagają właściwy kontur proksymalny.

#### 6. Zastosowanie formówki i klina

1. Chwyć formówkę pincetą z bolcami, posługując się otworem znajdującym się na uchwycie okluzyjnym. Jeśli pierścień był założony prawidłowo przed preparacją, formówka powinna wsunąć się łatwo na miejsce przylegające do przestrzeni do odbudowy z dostępu okluzyjnego. Należy upewnić się, że formówka znajduje się przywierzchołkowo do krawędzi preparacji bez szczeliny.

**Porada techniczna:** Jeśli klin WedgeGuard uniemożliwia pełne osadzenie przydziąsłowej formówki, należy nieznacznie wysunąć klin, założyć formówkę, a następnie umieścić z powrotem klin.

2. Zamknąć brzeg przydziąsłowy poprzez umieszczenie konturowanego klina lub anatomicznego klina drewnianego.

Kliny Palodent® V3 są wyposażone w uchwyt aplikacyjny z otworem, który można pewnie chwycić pincetą z bolcami. Zapewnia to bezpieczne założenie i minimalizuje prawdopodobieństwo upuszczenia małych akcesoriów. **Porada techniczna:** Wklęsła budowa klinów Palodent® V3 umożliwia łatwe zakładanie drugiego klina od przeciwnej strony (w razie potrzeby) bez usuwania pierwszego. **Porada techniczna:** Alternatywnie budowa rozwidlona umożliwia założenie najpierw pierścienia stabilizującego Palodent® V3 w razie takiego życzenia. Klin można następnie łatwo założyć przez rozwidlenie bez przemieszczania pierścienia.

7. Założyć pierścień stabilizujący Palodent® V3 w płaszczyźnie proksymalnej, w styczności z formówką i klinem, tym samym stabilizując wobec struktury zęba. Rozwidlone ząbki powinny znajdować się nad klinem.

8. Nieznacznie docisnąć formówkę do przyległego zęba, od strony policzkowej i językowej, aby ją bardziej dopasować w celu uformowania odpowiednich konturów. **WSKAZÓWKI:** Nadmierne dociśnięcie może odkształcić formówkę i zmienić kontury. Pinceta z bolcami ma do tego celu wbudowany dociskacz kulkowy. Uchwyt aplikacyjny formówki można zginać ponad przyległym grzebieniem brzętnym, aby ułatwić odbudowę kontury grzebienia brzętnego. **Porada techniczna:** W przypadku odbudowy ubytku typu MOD można założyć dwa pierścienie, skierowane w przeciwnych kierunkach, jeden w kierunku mezialnym, a drugi dystalnym, lub oba skierowane w tym samym kierunku, zazwyczaj mezialnym, jeden na drugim, umieszczając najpierw mezialną formówkę i pierścień.

9. Umieszczenie materiału do wypełnień

Umieścić materiał do wypełnień i uzyskać kontakt proksymalny zwykłą techniką. Utwardzić światłem i/lub pozostawić materiał do uzyskania początkowego związania. Przybliżone konturowanie można wykonać z formówką na miejscu.

10. Usuwanie formówki

Usunąć pierścień (pierścienie) kleszczami, usunąć klin (kliny) i formówki częściowe pincetą z bolcami. Wykończyć konturowanie i sprawdzić odpowiedni kontakt proksymalny. **Porada techniczna:** Zaleca się końcowe utwardzanie światłem, spolimerizowanych materiałów do wypełnień po usunięciu formówki ze wszystkich powierzchni, w tym kątów proksymalno-twarzowych i linii językowej.

## 4. HIGIENA



### Skażenie krzyżowe

- Nie używać ponownie produktów jednorazowego użytku. Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Podczas spalania kliny i kliny WedgeGuard mogą wytwarzać podrażniające i bardzo toksyczne gazy.
- Produkty przeznaczone do wielorazowego użycia należy poddawać procedurze przygotowania do ponownego użycia w sposób opisany poniżej.

### Instrukcje dezynfekcji/sterylizacji kleszczy do zakładania, pincety z bolcami i pierścieni stabilizujących Palodent® V3

#### Ostrzeżenia

- Sama dezynfekcja wysokiego poziomu nie jest odpowiednia dla kleszczy do zakładania, pincety z bolcami i pierścieni stabilizujących Palodent® V3.
- Nie zaleca się zanurzania kleszczy do zakładania, pincety z bolcami i pierścieni stabilizujących Palodent® V3 w roztworach dezynfekcyjnych.
- Nie można dopuścić do przekroczenia temperatury 134 °C przez produkt.
- Formówka częściowa, kliny i kliny WedgeGuard Palodent® V3 są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie próbować przeprowadzać procedury przygotowania do ponownego użycia ani nie używać ponownie. Prawidłowo zutylizować używane kliny, kliny WedgeGuard i formówki razem z innymi zanieczyszczonymi ostrymi przedmiotami.
- Prawidłowo zutylizować używane i/lub zanieczyszczone formówki, kliny lub kliny WedgeGuard zgodnie z lokalnymi przepisami. Podczas spalania kliny i kliny WedgeGuard mogą wytwarzać podrażniające i bardzo toksyczne gazy.
- Należy upewnić się, że wytrawiacze na bazie kwasu fosforowego są usunięte z ząbków pierścieni stabilizujących przed sterylizacją parową.

#### Ograniczenia

- Kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3 można poddawać czyszczeniu i automatycznej dezynfekcji do 500 razy, a procedurze sterylizacji do 1000 razy. Wielokrotna procedura przygotowania do użycia ma minimalny wpływ na kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3.
- Takie metody jak dezynfekcja/sterylizacja płynna na zimno, chemiczna sterylizacja parowa i sterylizacja gorącym powietrzem nie były testowane ani zatwierdzone pod kątem skuteczności i nie są zalecane do stosowania.

#### Miejsce użytkowania

- Usunąć nadmiar zabrudzeń jednorazową ściereczką/chusteczką papierową.
- Większość roztworów do czyszczenia ultradźwiękowego nie wpłynie na pierścienie Palodent® V3, chociaż substancje chemiczne w niektórych środkach czyszczących mogą spowodować przebarwienie ząbków. Przebarwienie jest tylko kosmetyczne, ale jeśli stanowi to problem, należy umieścić pierścienie w zlewce z wodą/roztworem detergentu i włożyć do myjki ultradźwiękowej w celu uniknięcia kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Zaleca się, aby kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami oraz pierścienie stabilizujące Palodent® V3 zostały poddane procedurze przygotowania do ponownego użycia, gdy tylko będzie to możliwe po użyciu.

Kwarantanna i transport	• Brak specjalnych wymagań.
Czyszczenie i dezynfekcja:	• Należy używać tylko prawidłowo konserwowanych, przeglądanych, skalibrowanych i zatwierdzonych myjki i dezynfektora (zgodnie z normą ISO 15883).
Automatyczne:	• Wykonać cykl programu czyszczenia (zalecany jest następujący cykl): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mycie wstępne/płukanie w zimnej wodzie wodociągowej przez 1 minutę.</li> <li>- Mycie detergentem enzymatycznym w temperaturze 55 °C przez 5 minut.</li> <li>- Neutralizacja enzymatyczna przez 6 minut.</li> <li>- Płukanie w wodzie dejonizowanej przez 1 minutę.</li> <li>- Dezynfekcja termiczna przy min. A0 wynoszącym 3000 (np. 5 minut w temperaturze 90 °C).</li> <li>- Suszenie przez 30 minut w temperaturze 60 °C.</li> </ul>
Czyszczenie i dezynfekcja:	• Jako alternatywa do automatycznego czyszczenia i dezynfekcji, kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3 należy oczyścić poprzez szorowanie w gorącej wodzie z mydłem lub detergentem. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Użyć nowej, czystej pary rękawiczek zabiegowych.</li> <li>- Po czyszczeniu należy dokładnie wytrzeć wszystkie powierzchnie produktu jednorazową ściereczką w połączeniu z roztworem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu i o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, zatwierdzonym zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy go stosować zgodnie z instrukcją użycia przygotowaną przez producenta roztworu dezynfekcyjnego. Należy upewnić się, że roztwór dezynfekcyjny jest kompatybilny z roztworem czyszczącym. Należy zwracać szczególną uwagę na płaszczyznę połączeń różnych elementów w produkcie.</li> <li>- Usunąć pozostałości roztworu dezynfekcyjnego ściereczką namoczoną w wodzie.</li> <li>- Wyrzucić rękawiczki zgodnie z lokalnymi przepisami i zdezynfekować ręce odpowiednim roztworem dezynfekcyjnym do rąk o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować zgodnie z instrukcją użycia przygotowaną przez producenta roztworu dezynfekcyjnego.</li> <li>- Produkt należy osuszać niestrzępiącą się, jednorazową ściereczką.</li> </ul>
Ręczne:	
Opakowanie do sterylizacji	• Można stosować papierowe/plastikowe torebki do sterylizacji parowej, ale nie są one wymagane. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Używać autoklawu parowego. Nie przekraczać temperatury 134 °C.</li> <li>• Sterylizacja parowa w autoklawie - Kompletny cykl: opakowane lub nieopakowane, w temperaturze 134 °C, 2 bar przez 3 minuty.</li> </ul>
Suszenie	• Zastosować cykl suszenia autoklawu. Nie przekraczać temperatury 134 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed przechowaniem pozostawić kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3 do całkowitego wysuszenia.</li> <li>• Unikać pozostawiania kleszczy do zakładania, pincety z bolcami i pierścieni stabilizujących Palodent® V3 w autoklawie lub przez długi czas, ponieważ może to spowodować przebarwienie od samego autoklawu.</li> </ul>
Konserwacja	• Jeśli kleszcze do zakładania, pinceta z bolcami lub pierścienie stabilizujące Palodent® V3 są uszkodzone, zużyte lub niekształcone, należy je wyrzucić. Przed użyciem należy skontrolować ząbki pod kątem uszkodzenia, takiego jak pęknięcia lub wżery. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleszcze i pinceta z bolcami Palodent® V3 nie wymagają żadnych innych czynności konserwacyjnych i nie należy ich oliwić ani natłuszczać.</li> <li>• Jeśli pierścień stabilizujący Palodent® V3 zostanie zdeformowany przez nadmierne rozciągnięcie podczas zakładania lub usuwania, należy go wyrzucić.</li> </ul>
Przechowywanie	• Kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3 należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc przed wilgocią lub nadmierną wilgotnością. Przed przechowaniem należy zdezynfekować/wysterylizować i osuszyć kleszcze do zakładania, pincetę z bolcami i pierścienie stabilizujące Palodent® V3. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterylizację nowych formówek, klinów i klinów WedgeGuard przed użyciem (w razie takiego życzenia) można uzyskać (jeden raz) poprzez sterylizację w autoklawie, w temperaturze 134 °C, przez minimum 3 minuty przed przechowaniem i/lub użyciem.</li> </ul>
Producent	• W Stanach Zjednoczonych można skontaktować się telefonicznie z firmą Dentsply Sirona pod numerem 1-302-422-4511. W przypadku regionów poza Stanami Zjednoczonymi należy skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Dentsply Sirona.

## 5. NUMER SERII I OCZEKIWANA TRWAŁOŚĆ UŻYTECZNA

1. Następujące numery należy podawać zawsze w korespondencji:

- Numer zamówienia
- Numer serii na opakowaniu
- Kopia dowodu zakupu

© 2017 Dentsply Sirona Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. **559702v** (R 10/5/17)