

Opcje obturacji

Przypadki standardowe

TruNatomy™
Sączki papierowe
Prime



TruNatomy™
Ćwieki gutaperkowe
Conform Fit
Prime



Opcjonalne

TruNatomy™
Sączki papierowe
Small & Medium



TruNatomy™
Ćwieki gutaperkowe
Conform Fit
Small & Medium



TruNatomy™

Przesuń granice wiedzy, zaufaj naturze

Kształtowanie kanału

Przypadki standardowe



Opracuj 2/3 kanału, stosując lubrykant.



Za pomocą łagodnych ruchów w zakresie 2-5 mm przeprowadź kształtowanie koronowej części kanału.



Stosując lubrykację, opracuj kanał na określoną długość roboczą i wypucz.



Aktywuj środki płuczące za pomocą endoaktywatora z końcówką Small



Opracuj kanał na długość roboczą, stosując łagodne ruchy pilnikiem. Nie stosuj ruchów szcztokujących. Po każdym pilniku z sekwencji TruNatomy rekapituluj (używając pilnika K-file) i stosuj irygację.

Opcjonalnie



Irygacja



Aktywuj środki płuczące za pomocą endoaktywatora z końcówką Small

Ustawienia silnika: 500 rpm | 1,5 Ncm