



Dla prawdziwych  
arcydziel wyciskowych

Honigum Pro



Wyciski takie  
jak chcesz:  
**Honigum Pro**



# Stabilny tam, gdzie potrzebujesz – płynny, kiedy tego chcesz.

Honigum Pro ułatwia wykonywanie zadań związanych z wyciskami w stomatologii i został opracowany specjalnie na potrzeby implantoprotetyki. Wyjątkowa precyzja VPS gwarantuje imponujące korzyści:

- Doskonała precyzja i czysta praca
- Bez kapania podczas aplikacji, bez niepożądanego spływania
- Doskonała płynność pod naciskiem
- Skuteczne usuwanie dzięki wyjątkowej wytrzymałości
- Dokładne wyciski
- Długi czas działania i krótki czas wiązania w jamie ustnej dzięki technologii „Snap-Set”

Czerp korzyści ze specjalnych funkcji materiału Honigum Pro w codziennej pracy. Opatentowana przez firmę DMG struktura materiału zapewnia precyzyjne wyniki szybko, bezpiecznie i czysto oraz osiąga najwyższe oceny w codziennych testach i badaniach – zarówno wśród pacjentów, jak i wśród stomatologów.


Dzięki doskonałej stabilności bez użycia siły Honigum Pro można bezpiecznie założyć i pozostawić w miejscu aplikacji. Pod wpływem nacisku – np. po wprowadzeniu łyżki – materiał niezawodnie dociera do najmniejszych przestrzeni nawet w wilgotnym środowisku, zapewniając dokładne wyciski. Użytkownik decyduje, kiedy Honigum Pro pozostaje stabilny, a kiedy płynny.



1.1 Nakładanie masy Honigum Pro Light.



2.1 Wprowadzanie łyżki wyciskowej wypełnionej Honigum Pro Putty i Honigum Pro Light.

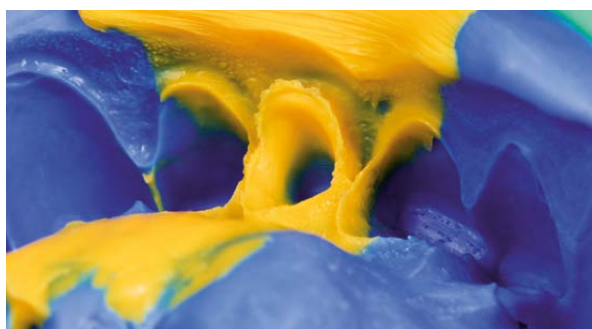

1.2 Efekt: homogeny wycisk.



2.2 Uzyskiwanie dokładnego wycisku dzięki Honigum Pro Putty i Honigum Pro Light.


# Honigum Pro – jednoznaczne korzyści w codziennej pracy.

Materiały do wycisków muszą dawać zadowalające wyniki, nawet gdy są stosowane w wilgotnych warunkach. Specjalna struktura krystaliczna Honigum Pro – reologicznie aktywna matryca – zapewnia decydującą wartość dodaną zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich pacjentów.

W testach i porównaniach z produktami konkurencyjnymi Honigum Pro wykazuje najlepszą płynność **w wilgotnych warunkach** w sztucznej bruździe w poddziąstłowym obszarze preparacji. Optymalna interakcja dobrej hydrofilowości i wyjątkowych właściwości reologicznych gwarantuje bezwzględną dokładność podczas pobierania wycisków.


Jednak to nie jedyna istotna zaleta Honigum Pro w codziennej pracy. **Doskonałe połączenie odporności na zerwanie i wydłużenie** – naukowo określane mianem wytrzymałości – ma zasadnicze znaczenie dla bezpiecznego wyjmowania z jamy ustnej. To kolejny czynnik, dzięki któremu Honigum Pro wyróżnia się na tle innych produktów, zapewniając najwyższą jakość odbudowy i jednocześnie gwarantując oszczędność czasu i pieniędzy. W końcu wycisk, który rozrywa się podczas wyjmowania z jamy ustnej, to wycisk zmarnowany.

## Głębokość penetracji w wilgotnej bruździe

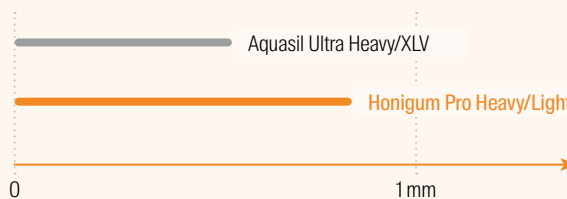

Honigum Pro charakteryzuje się najlepszą penetracją – dla najbardziej dokładnych wycisków<sup>2</sup>.

## Wytrzymałość

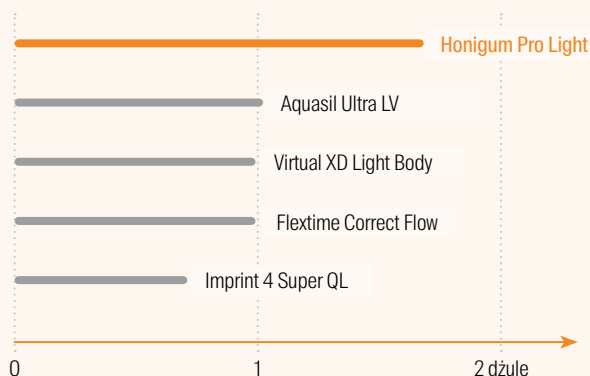

Honigum ProLight ma wysoką wytrzymałość – niezbędną dla bezpiecznego wyjmowania<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Źródło: Pomiary własne firmy DMG, dane archiwalne, 2011.


<sup>2</sup> Źródło: Prof. dr B. Wöstmann, Justus-Liebig-Universität Gießen, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik.

# Technologia „Snap-Set” dla maksymalnego komfortu

Długi czas pracy i krótszy czas wiązania w jamie ustnej – technologia „Snap-Set” firmy DMG uwzględnia potrzeby zarówno stomatologa, jak i pacjenta.


- Honigum Pro skraca **czas wiązania w jamie ustnej** i tym samym zapewnia znacznie większy **komfort** podczas leczenia.
- Minimalizuje to stres u pacjenta i u stomatologa prowadzącego.
- Stomatolog może **pracować spokojnie, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności** – nawet w jamie ustnej – ponieważ lepkość pozostaje stała przez długi czas.
- Pozwala to uniknąć zniekształceń powodowanych przez materiał, który zdążył stwardnieć.
- **Krótszy czas sieciowania** zmniejsza niedokładności spowodowane mikroruchami.

## Technologia „Snap-Set” Honigum Pro

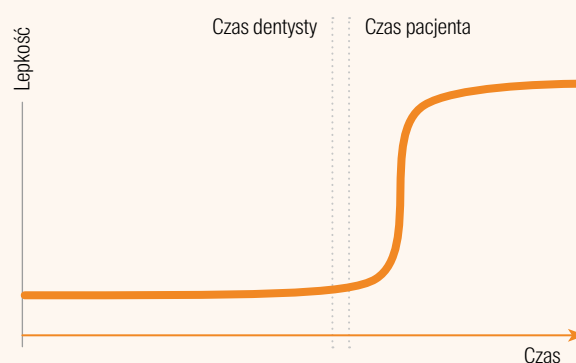

Dogodny czas pracy i krótki czas polimeryzacji w ustach.  
Maksymalna wygoda dla dentysty i pacjenta dzięki Honigum Pro.<sup>1</sup>

## Czasy pracy konwencjonalnych mas wyciskowych

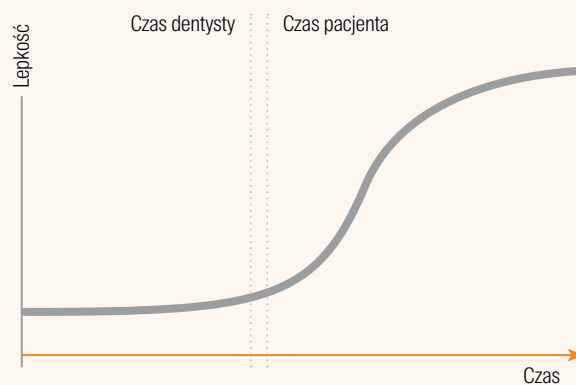

# Prościej, szybciej i bezpieczniej: MixStar eMotion

Łatwe odmierzanie, mieszanie i aplikacja Honigum Pro.

- **Łatwiej:** Za pomocą jednego naciśnięcia przycisku i dwóch timerów odmierzających czas pracy i czas wiązania w jamie ustnej można obsługiwać MixStar eMotion intuicyjnie, ale zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
- **Szybciej:** Napełniaj strzykawki lub łyżki wyciskowe na trzech poziomych prędkości i skróć proces nawet o 20 sekund w porównaniu z poprzednim modelem.
- **Bezpieczniej:** Elektroniczne sterowanie zapewnia dokładne dozowanie i minimalne straty materiału. Błędów można uniknąć, zapisując prawidłowe czasy pracy i wiązania w jamie ustnej.



MixStar eMotion oferuje elektryczną perfekcję podczas pracy z Honigum Pro.

## DMG Retraction Paste – nieskomplikowana pomoc przy pobieraniu wycisków



DMG Retraction Paste jest idealnym uzupełnieniem dla dokładnych wycisków i uzupełnień wykonywanych z Honigum Pro.

- Indywidualnie gięty zestaw pozwala na niezwykle łatwą aplikację w dowolnym miejscu w jamie ustnej pacjenta.
- Materiał pozostaje w miejscu aplikacji, gdzie optymalnie działa i jest wyraźnie widoczny w bruzdzie.
- Jednorodna konsystencja zapewnia optymalny efekt tymczasowej retrakcji bruzdy.

# Doskonałe wyniki w implantoprotetyce

W przypadku wycisków pod implanty precyzyjne przeniesienie sytuacji w jamie ustnej na model roboczy ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia precyzyjnie dopasowanej nadbudowy. Późniejsza dokładność dopasowania w jamie ustnej pacjenta może zostać zagwarantowana tylko wtedy, gdy pozycja wkładów wyciskowych zostaje dokładnie zarejestrowana i odtworzona. Dzięki unikalnym właściwościom Honigum Pro zapewnia również świetne efekty w implantoprotetyce.

- Dzięki doskonałej płynności Honigum Pro szczególnie dobrze otacza wkłady lub transfery wyciskowe i niezawodnie je mocuje. Szybkie wiązanie i wysoka twardość końcowa zapobiegają skręcaniu – zwłaszcza w przypadku Honigum Pro Heavy.
- Dzięki optymalnej stabilności materiał pozostaje w miejscu aplikacji i szczegółowo odwzorowuje strukturę dziąseł – oto gwarancja harmonijnej integracji implantoprotetyki z konturami dziąseł.



## Nasza wskazówka:

Honigum Pro jest dostępny w różnych wariantach, które można łączyć dokładnie według własnych wymagań. Warianty Fast materiału Honigum Pro jeszcze bardziej skracają czas pracy, natomiast mieszanina Honigum Pro Heavy i Honigum Pro Light w technice double-mix jest zalecana do prac łączonych na implantach i opracowanych zębach. W przypadku wycisku tylko pod implant, Honigum Pro Heavy nadaje się także do stosowania jako jednofazowy materiał wyciskowy.

**Opis różnych wariantów Honigum Pro można znaleźć na następnej stronie.**





# Namacalne korzyści w codziennej pracy

## Honigum Pro Light

Wysoce precyzyjna masa do wycisków korekcyjnych na bazie VPS o płynnej konsystencji

### Wskazania:

Wyciski pod korony, mosty i wkłady typu inlay i onlay

### Korzyści dla lekarza dentysty:

- Inteligentne parametry zapływania i wyjątkowa stabilność
- Wyjątkowe właściwości hydrofilowe
- Odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów
- Bardzo duża wytrzymałość
- Łatwy do odczytania kontrast kolorów

## Honigum Pro Heavy

Precyzyjny materiał wyciskowy na bazie VPS o gęstej konsystencji

### Wskazania:

Wyciski pod korony i mosty, wkłady typu inlay i onlay, wszystkie rodzaje wycisków, np. pod implanty

### Korzyści dla lekarza dentysty:

- Duża twardość końcowa
- Przyjemny opór podczas pozycjonowania
- Łatwe i bezpieczne wyjmowanie z jamy ustnej
- Homogeniczna jakość materiału bez pęcherzyków powietrza

## Honigum Pro Putty

Precyzyjny materiał wyciskowy na bazie silikonów addycyjnych o konsystencji putty

### Wskazania:

Wyciski pod korony, mosty i wkłady typu inlay i onlay

### Cechy szczególne:

Prawdziwa konsystencja masy z wkładu MixStar firmy DMG

### Korzyści dla lekarza dentysty:

- Doskonałe odzyskiwanie kształtu po deformacji
- Doskonała stabilność wymiarowa
- Możliwość ręcznego kształtowania

## Honigum Pro Mono

Jednofazowy materiał wyciskowy na bazie VPS o średniej konsystencji

### Wskazania:

Wyciski pod korony, mosty, wkłady typu inlay i onlay, wyciski czynnościowe oraz określanie punktów nacisku i wszystkie rodzaje wycisków, np. pod implanty

### Korzyści dla lekarza dentysty:

- Precyzyjny efekt w jednym etapie
- Łatwe i bezpieczne wyjmowanie z jamy ustnej
- Wysoka hydrofilowość i doskonała zapływalność
- Dokładne odwzorowanie krawędzi preparacji
- Bardzo duża wytrzymałość na rozerwanie



Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

[www.dmg-dental.com](http://www.dmg-dental.com)

## Opakowania

### Honigum Pro Light

#### Opakowania:

- 2 Wkładów @ 50 ml
- 10 Automix Tips Yellow 1:1
- 10 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Light  
Honigum Pro Light Fast

REF 929831  
REF 929832

#### Opakowanie ekonomiczne:

- 8 Wkładów @ 50 ml
- 40 Automix Tips Yellow 1:1
- 40 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Light  
Honigum Pro Light Fast

REF 929835  
REF 929836

### Honigum Pro Mono

#### Opakowania:

- 2 Wkładów @ 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1
- 4 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929830  
REF 929976

#### Opakowanie ekonomiczne:

- 8 Wkładów @ 50 ml
- 16 Automix Tips Green 1:1
- 16 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929834  
REF 929977

- 1 Wkład @ 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929568  
REF 929978

- 5 Wkładów @ 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Mono  
Honigum Pro Mono Fast

REF 929569  
REF 929979

### Honigum Pro Heavy

#### Opakowania:

- 2 Wkładów @ 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929766  
REF 929838

#### Opakowanie ekonomiczne:

- 8 Wkładów @ 50 ml
- 16 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929837  
REF 929839

- 1 Wkład @ 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929537  
REF 929638

- 5 Wkładów @ 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Heavy  
Honigum Pro Heavy Fast

REF 929538  
REF 929637

### Honigum Pro Putty

#### Opakowania:

- 1 Wkład @ 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Putty

REF 929374

#### Opakowanie ekonomiczne:

- 5 Wkładów @ 380 ml
- 50 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Putty

REF 929375

- 2 Pojemników @ 450 ml

Honigum Pro Putty Soft  
Honigum Pro Putty Soft Fast  
Honigum Pro Putty Rigid Fast

REF 929364  
REF 929365  
REF 929366

- 8 Pojemników @ 450 ml

Honigum Pro Putty Soft  
Honigum Pro Putty Soft Fast  
Honigum Pro Putty Rigid Fast

REF 929369  
REF 929370  
REF 929371

### Honigum Pro Scan

#### Opakowania:

- 2 Wkłady @ 50 ml
- 4 Automix Tips Green 1:1

Honigum Pro Scan Heavy

REF 929983

#### Opakowania:

- 1 Wkład @ 380 ml
- 10 MixStar Tips Blue

Honigum Pro Scan Heavy

REF 929981

- 2 Wkłady @ 50 ml
- 10 Automix Tips Yellow 1:1
- 10 Intraoral Tips Yellow

Honigum Pro Scan Light

REF 929984

### DMG Retraction Paste

#### Opakowania:

- 25 Kaniul @ 0,37 g

REF 919381

#### Aksesoria:

- 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
- 50 Automix Tips Yellow 1:1
- 50 Intraoral Tips Yellow
- 50 Automix Tips Green 1:1
- 50 Intraoral Tips Transparent

REF 909507  
REF 909200  
REF 909201  
REF 909490  
REF 909400

#### Aksesoria:

- 1 Safetip Dispenser
- 1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122  
REF 220829

- 1 MixStar eMotion 230 V Int.
- 50 MixStar Tips Blue

REF 900480  
REF 903334

- 1 Butelecza @ 10 ml DMG Tray Adhesive

REF 909394

# Honigum Pro

Twórz prawdziwe arcydzieła wśród wycisków



**A smile ahead**  
together



**DMG**

**Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH**

Elbgastraße 248 22547 Hamburg Germany

Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222

info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com

www.facebook.com/dmgdental

