



ZAWARTOŚĆ

Zestaw zawiera strzykawkę wypełnioną 2,6 g lub 6,5 g lub 13 g lub 60 g preparatu w postaci żelu + końcówki do WYTRAWIACZA.

MD Wyrób medyczny klasy IIa

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY służy do zwiększenia adhezji pomiędzy tkankami zęba a uzupełnieniami kompozytowymi. Na skutek wytrawiania kwasem o-fosforowym dochodzi do rozpuszczenia składników mineralnych i zwiększenia chropowatość powierzchni zęba. Trawienie WYTRAWIACZEM STOMATOLOGICZNYM prowadzi również do wzrostu energii powierzchniowej, co znacznie poprawia zwilżalność szkliwa przez system wiążący. WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY ma postać żelu, dzięki czemu ograniczone zostaje niekontrolowane działanie demineralizacyjne kwasu o-fosforowego na twarde tkanki zęba. Forma żelu zapewni również stałą wilgotność trawionej powierzchni oraz zapobiega blokowaniu powstających mikrokanalików solami wapnia strącającymi się podczas procesu trawienia.

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY może być stosowany przy:

- wypełnieniach chemo- i światłoutwardzalnych
- lakach szczelinowych
- stabilizacji zębów: stałej i tymczasowej
- ortodontycznych aparatach stałych
- przygotowaniu powierzchni metalowych, kompozytowych i akrylowych prac protetycznych przed użyciem cementów podwójnego wiązania

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Na dokładnie oczyszczoną i osuszoną powierzchnię szkliwa nałożyć cienką warstwę WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO. Pozostawić na zębie około 30 sekund. Następnie przepłukać silnym strumieniem wody. Dokładnie osuszyć, aż szkliwo uzyska matowo-biały kolor. Wytrawianie należy powtórzyć jeśli szkliwo nie zmatowieje lub zostanie zanieczyszczone śliną. Nie wytrawiać dłużej niż 60 sekund.

SKŁAD

Substancja czynna: kwas o-fosforowy 36%.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników materiału.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia natychmiastowej reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY może rozpuszczać podkłady oparte na gląsjonomerach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY zawiera kwas o-fosforowy 36%, który przy przedłużonym kontakcie może wykazywać właściwości korozyjne. W przypadku kontaktu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO z materiałem wrażliwym na działanie kwasów, należy szybko zmyć zanieczyszczoną powierzchnię silnym strumieniem wody.

Unikać kontaktu WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem podając informacje o produkcie. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maskę na twarz i okulary ochronne.

W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się stosowanie koferdamu.

W przypadku połknięcia nie należy prowokować wymiotów. Zaleca się wypicie dużej ilości wody i natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem.

W przypadku zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W celu uniknięcia zasychnięcia WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO, tuż po użyciu wyrobu należy usunąć preparat z końcówki skutecznie cofając tłoczek strzykawki.

WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY przeznaczony jest do wielokrotnego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. Unikać kontaktu aplikatora z tkankami pacjenta. Jeśli kontakt wystąpił - zaleca się wymianę aplikatora.

OSTRZEŻENIA



Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.



Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów, techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 24.02.2020 r.



ARKONA



ARKONA

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99C 21-025 Niemce EU

www.arkonadent.com



1639