





OliSeal SE

SAMOWYTRAWIAJĄCY USZCZELNIACZ BRUZZD

samowytrawiający i **samo**adhezyjny

OliSeal SE to płynny kompozytowy uszczelniacz do bruzd i zagłębień anatomicznych. Dzięki jego właściwościom samowytrawiającym, etap konwencjonalnego wytrawiania kwasem ortofosforowym może zostać pominięty. Zastosowanie wytrawiacza przed aplikacją OliSeal SE zwiększa jednak adhezję do szkliwa do prawie **30 MPa**.

Na uwagę zasługuje fakt, iż adhezja konkurencyjnego produktu do wytrawionego szkliwa jest niemal równa adhezji OliSeal SE do szkliwa niewytrawionego.

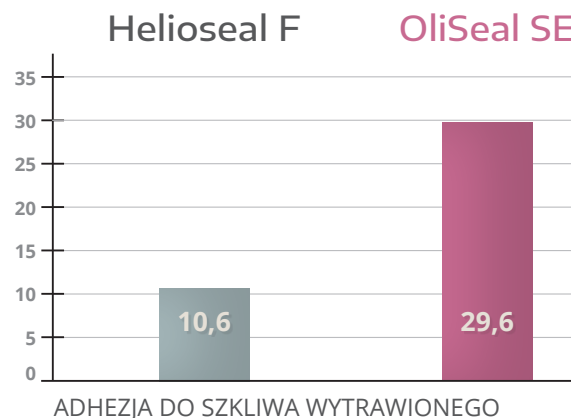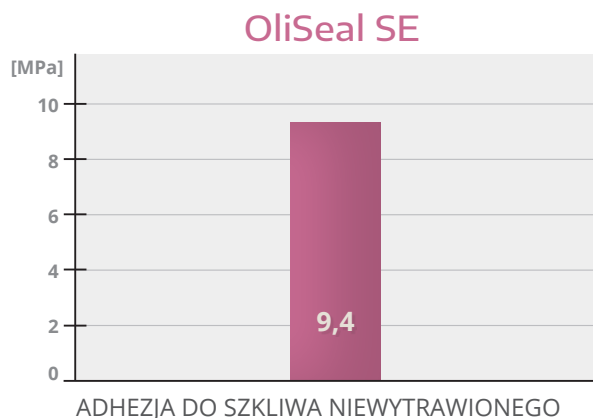

stabilny w obszarach okluzyjnych

Oprócz optymalnej płynności, która gwarantuje doskonałe zapływanie do bruzd, OliSeal SE wykazuje wyjątkową odporność na biomechaniczne warunki okluzyjne. Wysoka wytrzymałość na ściskanie (**310 MPa**), zginanie (**113 MPa**), rozciąganie (**55 MPa**) i niskie zużycie abrazyjne (**31 μm** w teście „3-body wear”) sprawiają, że warstwa ochronna pozostaje niezmieniona w długim okresie użytkowania.

OliSeal SE osiąga jedne z najlepszych wyników wśród uszczelniaczy bruzd.



■ szybki i łatwy w użyciu

OliSeal SE przeznaczony jest do profilaktycznego i poszerzonego uszczelniania bruzd i szczelin. Możliwość pominięcia etapu wytrawiania, znacznie skraca czas trwania całej procedury. OliSeal SE nie wymaga także stosowania systemu wiążącego ani primerów.

Szybka i prosta aplikacja jest szczególnie doceniana podczas leczenia dzieci i niespokojnych pacjentów.

45 sec.

**czas pełnej
procedury**
aplikacja i polimeryzacja



Nałożyć OliSeal SE bezpośrednio ze strzykawki na uprzednio oczyszczoną powierzchnię zęba.



Za pomocą pędzelka/szczoteczki rozprowadzić cienką warstwę OliSeal SE i wmasowywać przez 25 sekund.




Utwardzać światłem przez 20 sekund. Sprawdzić okluzję i skorygować, jeśli to konieczne.



wygodny, skuteczny i trwały

- **SZYBKA I ŁATWA PROCEDURA**
- **DOSKONAŁA ADAPTACJA DO SZKLIWA**
- **PROFILAKTYCZNE UWALNIANIE FLUORU**
- **WYSOKA ODPORNOŚĆ MECHANICZNA**
- **DŁUGOTRWAŁA OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ**

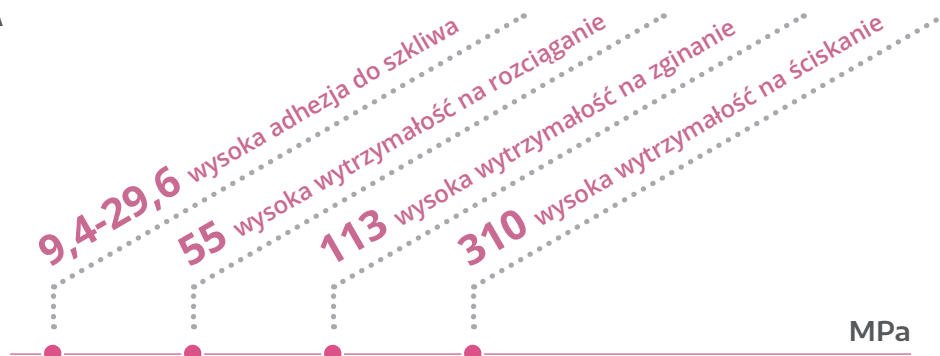

dostępne opakowanie

- 1 strzykawka 2g - biały opaker
- 3 końcówki aplikacyjne Luer-Lock

REF OL121



OLIDENT



facebook



YouTube



SKANUJ

by dowiedzieć się więcej.